

PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVO DE DERMATOFITOS.

- ✓ Realizar una inspección previa de la zona de donde se va a obtener la muestra, verificando que no está tratada con medicamentos que podrían afectar al resultado del ensayo.
- ✓ Para reducir las posibilidades de contaminaciones causadas por agentes saprofitas o bacterias, recomendamos la realización de una limpieza del área donde se va a obtener la muestra con alcohol al 70%.
- ✓ Utilizando un escalpelo estéril, obtener escamas cutáneas y pelos del borde de la zona afectada por la lesión.
- ✓ Los gatos pueden ser portadores inaparentes, que podrían causar infección en otros animales o en el hombre. Cuando se trate de un paciente sospechoso de ser portador inaparente, utilizar un cepillo de dientes estéril o al menos nuevo, para cepillar el cuerpo o aquellas áreas en la que se sospecha presencia de dermatofitos y utilizar el pelo así obtenido como muestra para su cultivo.

PetLab Valdivia
Laboratorio Clínico Veterinario